

## Правила забора буккального эпителия.

1. Используйте цитощетку типа D.
2. За 30 мин. до проведения забора животное следует не кормить и изолировать от других животных.
3. Материал собирается с внутренней поверхности щеки вращающими движениями и с нажимом не менее 10 секунд. После забора зонд нужно подсушить и поместить обратно в заводскую упаковку или в бумажный конверт. **Убедительная просьба не приклеивать цитощетки скотчем к направлению.**
4. Терморезим при хранении и транспортировке не требуется.
5. От каждого животного необходимо предоставить по 2 цитощетки, независимо от количества исследований.

### Чем можно заменить цитощетки:

- урогенитальными зондами типа А (тоже по 2 шт. от животного);
- межзубными ершиками (для чистки брекетов, можно купить в аптеке);
- так же подойдет кровь в пробирке с ЭДТА.

**Обращаем Ваше внимание на то, что мы не принимаем материал на ватных палочках.**

Цитощетка типа D



Урогенитальный зонд типа А

